


Die Bedienungselemente des Blutzucker-Messgeräts


Vorderseite

- 1 Display
- 2 Aufnahme für Teststreifen

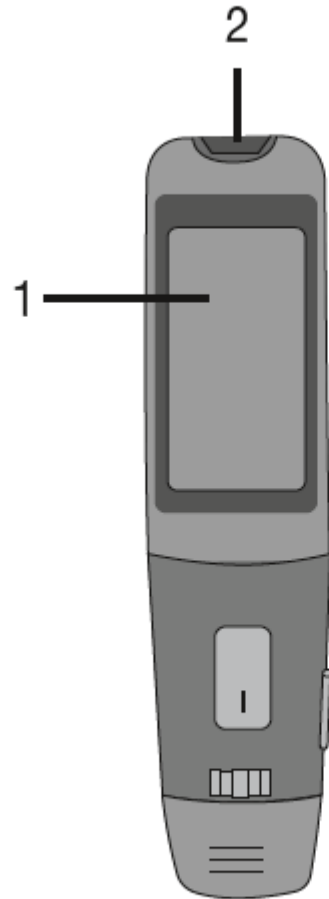

Seite

- 1 Bedienrad
- 2 EIN/AUS-Schalter
- 3 Schieber zum Spannen

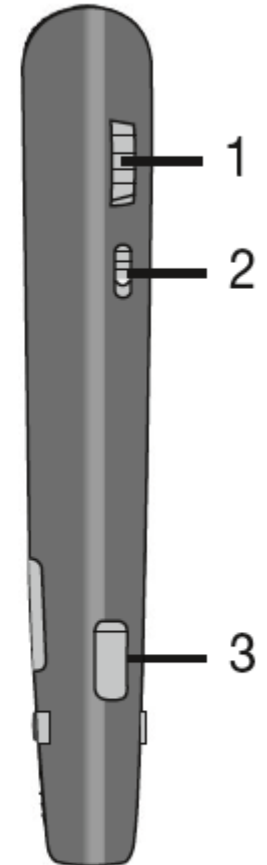

So stellen Sie die Uhrzeit um:

Sie müssen Datum/Uhrzeit unbedingt einstellen. Nur so können Sie Ihre Messwerte korrekt mit Datum und Uhrzeit speichern und später abrufen.

Die Uhrzeit kann im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden.

1. Schalten Sie das Blutzucker-Messgerät ein, indem Sie das Bedienrad kurz gedrückt halten.

2. Drehen Sie das Bedienrad bis der Pfeil auf "Einstellungen" zeigt und drücken Sie das Bedienrad

• Alle Werte
• Durchschnitt
• Einstellungen
↶ Zurück

3. Drehen Sie das Bedienrad bis der Pfeil auf "Datum/Uhrzeit" zeigt und drücken Sie das Bedienrad.

• Timer
• Alarm
• Datum/Uhrzeit
• Bluetooth Ein/Aus

4. Stellen Sie durch Drehen des Bedienrads das Jahr ein und drücken Sie das Bedienrad

Jahr 2018
Monat 03
Tag 25
24h/12h Modus 24h

5. Stellen Sie Monat, Tag, 24h/12h Modus, Stunde und Minute ebenso ein.

6. Um die Einstellungen zu speichern, drehen Sie das Bedienrad bis der Pfeil auf "Speichern" zeigt und bestätigen Sie durch Drücken des Bedienrads.

24h/12h Modus 24h
Stunde 12
Minute 00
Speichern